



**CHW-Technik**  
OT-Produkte · GmbH

Gebrauchsanweisung

# **Einspannhilfe**

## **6020003**



Die Einspannhilfe ist für das Fixieren von Modellen am jeweiligen Arbeitsplatz für die weitere Bearbeitung vorgesehen.

Sie wird waagrecht in den Schraubstock eingespannt. Dabei liegt der Stift auf dem Schraubstock auf und die Schraube steht nach oben.



Der Gips wird mit der eingegippten Stange in die Einspannhilfe gesteckt und mit der Flügelschraube in der gewünschten Position festgeschraubt.

Durch das Verschwenken des Schraubstocks lässt sich das Werkstück auch in der Horizontalen drehen.



Mit der Schraubstockeinspannung lässt sich der Gips um den Stift drehen. Beim Lösen des Schraubstocks liegt die Einspannhilfe mit dem Stift auf, und der Gips muss nur auf der anderen Seite gehalten werden.





Die Einspannhilfe hat eine 25 mm Bohrung und ist für Stangen ab einem Durchmesser von 10 mm geeignet.



CHW-Technik GmbH  
Kolligsbrunnen 1, 37115 Duderstadt  
Tel.: 05527/998969  
Fax.: 05527/998967  
[h.wagner@chw-technik.de](mailto:h.wagner@chw-technik.de)  
[www.chw-technik.de](http://www.chw-technik.de)

Date / Revision: 2022-12