



CHW-Technik

OT-Produkte · GmbH

Gebrauchsanweisung

Einspannhilfe 6020003



Die Einspannhilfe ist für das Fixieren von Modellen am jeweiligen Arbeitsplatz für die weitere Bearbeitung vorgesehen.

Sie wird waagrecht in den Schraubstock eingespannt. Dabei liegt der Stift auf dem Schraubstock auf und die Schraube steht nach oben.



Der Gips wird mit der eingegipsten Stange in die Einspannhilfe gesteckt und mit der Flügelschraube in der gewünschten Position festgeschraubt.

Durch das Verschwenken des Schraubstocks lässt sich das Werkstück auch in der Horizontalen drehen.



Mit der Schraubstockeinspannung lässt sich der Gips um den Stift drehen. Beim Lösen des Schraubstocks liegt die Einspannhilfe mit dem Stift auf, und der Gips muss nur auf der anderen Seite gehalten werden.





Die Einspannhilfe hat eine 25 mm Bohrung und ist für Stangen ab einem Durchmesser von 10 mm geeignet.



CHW-Technik GmbH
Kolligsbrunnen 1, 37115 Duderstadt
Tel.: 05527/998969
Fax.: 05527/998967
h.wagner@chw-technik.de
www.chw-technik.de

Date / Revision: 2022-12